

INRatio®2

Nuevo Sistema de monitoreo Inratio 2 TP/RIN

*Una excelente solución para el
manejo de pacientes anticoagulados.*

*Una alternativa sencilla,
confiable y práctica para mejorar
la efectividad clínica del tratamiento
anticoagulante oral.*

- ✓ Sistema compacto
y fácil de transportar.
- ✓ Uso simple.
- ✓ Solamente una gota de sangre.
- ✓ Resultados en 60 segundos.
- ✓ Controles de calidad integrados
para cada test.



BIOLINKER
www.biolinker.com.ar

INRatio® 2

Mayor eficiencia en la atención al paciente

El sistema Inratio 2 permite obtener resultados al lado del paciente en solo 60 segundos, agilizando la toma de decisiones en el ajuste de dosis de pacientes tratados con anticoagulantes orales.

Estandarización Internacional

Alere Inratio 2 está calibrado de acuerdo a las directrices de la OMS y utiliza una tromboplastina recombinante con un ISI bajo (1,0).

Por qué elegir Alere Inratio 2



Sólo se necesita una gota de sangre sin medida previa, para ser aplicada a la tira. 15 ul son suficientes para realizar el análisis y los controles de calidad.



Tiras en envoltorio individual, que asegura su correcta conservación. Almacenamiento a temperatura ambiente hasta 12 meses. Dos presentaciones (12 y 48 unidades).



Solo Alere Inratio 2 realiza dos niveles de control de calidad en cada tira de análisis y en tiempo real. El QC1 (normal) y el QC2 (terapéutico) se procesan en forma automática en cada tira y los resultados cuantitativos son registrados y mostrados en pantalla.



Realización de la prueba

Tres sencillos pasos para realizar un análisis con Alere Inratio 2



1. Insertar una tira nueva. Encender el monitor y confirmar el código de la tira.
2. Realizar la punción digital y aplicar la muestra en el área iluminada.
3. Esperar 60 segundos para obtener los resultados.